

ANTIGEN-SCHNELLTEST BIOSYNEX COVID-19 AG BSS



ANTIGEN-SCHNELLTEST BIOSYNEX COVID-19 AG BSS

- Immunchromatographischer Test in Kassettenform, für die schnelle Diagnose von Covid-19
- Kit-Format, erfordert kein zusätzliches Material oder Ausrüstung
- Aus Nasen-Rachen-Abstrichproben
- 96% Sensitivität und 100% Spezifität
- Keine Kreuzreaktivität mit menschlichen Coronaviren (229E, OC43, NL63 und HKU1), Influenza A und B und RSV A und B
- Ergebnis in 15 Minuten
- CE IVD-zertifiziert

Inhalt des Kits :

- 25 Testkassetten
- 2 Fläschchen mit Extraktionspuffer
- 25 sterile Tupfer
- 25 Extraktionsröhrchen
- Ständer
- Bedienungsanleitung



Art. Nr.	Bezeichnung	VE
674200	Antigen-Schnelltest Biosynex Covid-19 Ag BSS	25 Kassetten

ERGEBNIS




Positiv




Negativ


VERFAHREN

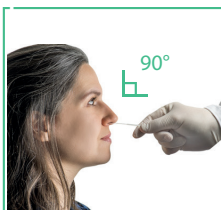


Den Tupfer **horizontal** in die Nasenhöhle einführen

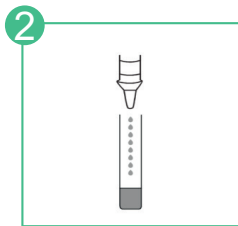


10 Tropfen (0,3 ml) Extraktionspuffer hinzufügen

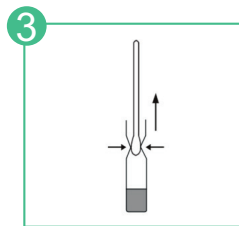

Entladen Sie den Tupfer in das Röhrchen, indem Sie den Tupfer etwa **1 Minute lang drehen**

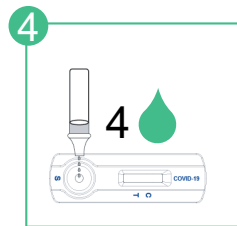

Setzen Sie die Dosierspitze auf das Röhrchen und geben Sie **4 Tropfen** der Lösung in die Vertiefung S

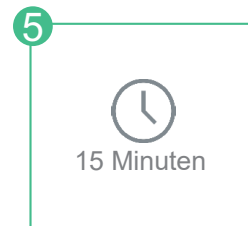

Lesen Sie das Ergebnis nach **15 Minuten** ab. Interpretieren Sie das Ergebnis nicht nach 20 Minuten

Für das vollständige Verfahren lesen Sie das Handbuch